

Mund-Nasen-Maske „die tapfere Schneiderin by permanent-es“

Gebrauchshinweise

Gegenstand	Beschreibung
Maskenart	Bei der „ die tapfere Schneiderin by permanent-es “ handelt es sich um eine sehr hochwertige Mund-Nasen-Maske.
Stoff	100% Baumwolle [Bio-Baumwolle]
Verwendung	Nur für die private Verwendung bestimmt. Kein Medizinprodukt oder persönliche Schutzausrüstung. Nicht für den Einsatz im Gesundheits- oder Pflegewesen, als Arbeitsschutz oder sonstige Schutzausrüstung zum Schutz vor Infektionen oder anderen Schadstoffen geeignet.
Besonderheit	Eingelassener Hochleistungsfilter mit nachgewiesenem Abscheidegrad von 99% bei Partikelgröße 1 µm. Nachweis durch Palas GmbH Partikel- und Lasermesstechnik, Greschbachstraße 3b, 76229 Karlsruhe, Deutschland [www.palas.de]
Tragen der Maske	Achten Sie darauf, dass Sie vor und nach dem Abnehmen der Mund-Nasen-Maske, Hände und Gesicht gründlich mit Seife für mind. 20sec. waschen. Kommt es während dem Tragen zu einer Berührung mit dem Mundstück der Maske, waschen Sie sich die Hände. <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Nach dem Anlegen der Mund-Nasen-Maske den Nasenbügel der eigenen Nasenform anpassen, um eine bestmögliche Passung und Abdichtung zu erreichen.</p>
Durchfeuchtung	Sobald Sie eine Durchfeuchtung der Mund-Nase-Maske bemerken ist sie abzunehmen und im mitgelieferten Zipp-Beutel zu verwahren und bei nächster Möglichkeit zu reinigen. Der Beutel kann davor und danach mit Desinfektionsmittel gereinigt werden.
Abnehmen der Mund-Nasen-Maske	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lösen Sie die Bindung 2) Fassen Sie nur an die Seiten 3) Berühren Sie nicht das Mundstück (zentraler Bereich) 4) Verwahren Sie sie sicher in einem luftdichten Beutel 5) Waschen Sie sich gründlich die Hände und ggf. das Gesicht (mind. 20sec) mit Seife

Reinigung	<p>Waschen (zwischen 70°C und 90°C) Bei höheren Temperaturen kann es zu Farbauswaschungen bei bunten Masken kommen.</p>  	<p>Empfehlung Kochtopf:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wasser im Kochtopf aufkochen bis Sidetemperatur (bis es blubbert) 2. Kochtopf vom Herd nehmen bzw. Herdplatte ausschalten. 3. Warten bis es nicht mehr blubbert 4. Maske vorsichtig einlegen 5. 10 Minuten ziehen lassen 6. Maske am besten mit Zange vorsichtig entnehmen <p>Empfehlung Wasserkocher:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maske nach Temperaturerreicherung von 70-90 Grad in Wasserkocher legen, Wasser soll nicht mehr sprudeln 2. 10 Minuten ziehen lassen 3. Maske am besten mit Zange vorsichtig entnehmen. <p>Empfehlung UV-C Licht:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gerät mit geeigneter Wellenlänge und CE Zulassung für medizinische Zwecke verwenden 2. Gebrauchsanweisung unbedingt lesen und beachten 3. Je nach Gerätetyp mit UV-C Licht bestrahlen 4. Maske entnehmen 	
	Trocken		Trocknen aus dem tropfnassen Zustand durch Aufhängen
			Nicht im Tumbler/Trockner trocknen
	Bügeln		Nicht bügeln
	Desinfektionsmittel	Keine Verwendung von Desinfektionsmitteln auf dem Mundstück (zentraler Bereich) der Mund-Nasen-Maske. Es kann zu Schädigung des Hochleistungsfilters kommen.	



Herstellung	<i>Nähatelier</i> <i>Die tapfere Schneiderin</i> Inhaberin: Brigitte Wagner Kummerssteige 2 74731 Walldürn-Gerolzahn www.dietapfereschneiderin.de
Produktentwicklung, Vermarktung und Vertrieb	permanent-es Personalmanagement Inhaberin: Erika Schroth Kirchenbergweg 43 69118 Heidelberg fon +49 6221 800927 www.permanent-es.de